

Documento PRE-SALE (rif. EN 12182) per carrozzine per persone disabili

Tipologia carrozzine	Superleggere a telaio rigido PROGEO a propulsione manuale			
Modelli	<p>JOKER/JOKER JUNIOR</p> 	<p>JOKER EVOLUTION</p> 	<p>JOKER ENERGY</p> 	<p>NOIR</p> 
Utilizzo previsto	<p>Il dispositivo è progettato per le persone (adulti, adolescenti, bambini) con scarsa o totalmente compromessa mobilità degli arti inferiori. Il dispositivo prevede l'autospinta manuale da parte del paziente e/o la spinta da parte di un accompagnatore.</p>			
Ambiente di utilizzo	<p>Il dispositivo è adatto per ambienti interni ed esterni dove la temperatura sia compresa tra i -30° ed i + 60° C. Si sconsiglia l'utilizzo terreni sabbiosi, particolarmente sconnessi oppure con pendenza superiore del 6%. Si sconsiglia l'utilizzo ambienti acidi.</p>			
Misure	Vedi tabella a pagina 2			
Sistema di chiusura e di apertura	<p>Solo schienale.</p> <p>Per abbatterlo è necessario tirare un cordino di sblocco e poi accompagnare lo schienale verso il basso fino al bloccaggio.</p> <p>Per aprirlo è necessario tirare un cordino di sblocco e poi accompagnare lo schienale verso la posizione di utilizzo fino al bloccaggio</p> 			
Ulteriore riduzione di ingombro	<p>Ruote posteriori estraibili con perni ad estrazione rapida.</p> 			
Dimensioni e pesi	vedi tabella a pagina 3			
Accessori	Vedi tabella a pagina 4			
Manutenzione	<p>Il normale e quotidiano utilizzo del dispositivo potrebbe comportare l'allentamento di alcune viti di fissaggio nei vari punti della carrozzina. Un controllo periodico di tutte le viti di fissaggio viene consigliato. Un controllo è sempre necessario qualora si notassero delle anomalie di funzionamento.</p> <p>Le ruote posteriori, eccetto per quelle piene, devono essere controllate e gonfiate periodicamente al fine di mantenere un'ottima scorrevolezza.</p>			
Pulizia	<p>Il dispositivo è soggetto a sporcarsi ed è pertanto necessario, anche per ragioni igieniche, pulirlo regolarmente con un panno umido e detersivi non aggressivi. In ambienti sabbiosi, è indispensabile pulire tutti i cuscinetti delle ruote anteriori e posteriori ma anche le parti soggette a frizione o rotazione (rotazione schienale, perno pedana alzabile, perno ad estrazione rapida).</p>			
Trasporto in veicoli	<p>Questo dispositivo NON è progettato per il trasporto del paziente (seduto sul dispositivo stesso) in autoveicoli. NON è predisposto con i punti di ancoraggio.</p> <p>Il paziente deve prendere posto nei sedili dell'automezzo.</p>			
Garanzia	I termini e condizioni della garanzia del dispositivo sono riportati nel manuale d'uso fornito con il dispositivo stesso.			

TABELLA MISURE DEL DISPOSITIVO

	parametro		JOKER JK JUNIOR	JOKER EVOLUTION	JOKER ENERGY	NOIR
	LARGHEZZA SEDUTA mm		Joker 330 360 390 420 450 480 Joker Junior 270 300 330 360 390 Non regolabile	330 360 390 420 450 Non regolabile	330 360 390 420 450 480 Non regolabile	330 360 390 420 450 Non regolabile
	PROFONDITA' SEDUTA mm		Joker 350 375 400 425 450 475 500 Joker Junior 300 325 350 375 400 Non regolabile	350 375 400 425 450 475 Non regolabile	350 375 400 425 450 475 500 Non regolabile	350 375 400 425 450 475 Non regolabile
	ALTEZZA SEDUTA mm	Post Ant	Da 380 a 460 Da 400 a 560 Regolabile	Da 380 a 460 Da 400 a 560 Regolabile	Da 360 a 520 Da 360 a 540 Su misura, non regolabile	Da 370 a 480 Da 440 a 540 Su misura, non regolabile
	ASSETTO mm (punto bilanciamento)		75 molto prudente 90 prudente 105 standard 120 attivo 135 estremo Per il modello Junior gli assetti sono di 15 mm più corti. Regolabile	75 molto prudente 90 prudente 105 standard 120 attivo 135 estremo Regolabile	75 molto prudente 90 prudente 105 standard 120 attivo 135 estremo Su misura, non regolabile	75 molto prudente 90 prudente 105 standard 120 attivo 135 estremo Su misura, non regolabile
	ALTEZZA SCHIENALE mm		Da 245 a 470 Regolabile	Da 245 a 470 Regolabile	Da 245 a 470 Regolabile	Da 245 a 470 Regolabile
	ANGOLO SCHIENALE ° (rispetto alla seduta)		Da 74 a 94 Regolabile	Da 74 a 94 Regolabile	Da 74 a 94 Regolabile	Da 74 a 94 Regolabile
	DISTANZA PEDANA mm		Joker da 350 a 540 Joker Junior da 150 a 500 Regolabile	Da 350 a 540 Regolabile	Su misura non regolabile. Oppure Su misura con rego- lazione + 15 – 15 (telaio optional)	Su misura non regolabile. Oppure Su misura con regolazione + 15 – 15 (telaio optional)
	ANGOLO TELAIO °		85 90 95 (carbonio) 85 90 100 (alluminio)	85 90 95 (carbonio) 85 90 100 (alluminio)	Su misura	85 90 95
	CAMPANATURA °		0 2 4	0 2 4	0 2 4 8 12	0 2 4

TABELLA MISURE DEL DISPOSITIVO					
	parametro	JOKER JK JUNIOR	JOKER EVOLUTION	JOKER ENERGY	NOIR
	LARGHEZZA TOTALE mm	Larghezza seduta + 170 (con campanatura 0°)	Larghezza seduta + 170 (con campanatura 0°)	Larghezza seduta + 170 (con campanatura 0°)	Larghezza seduta + 170 (con campanatura 0°)
	LUNGHEZZA TOTALE mm	Joker 880 Joker Junior 750	880	850	850
	PESO CARROZZINA Kg (il peso complessivo varia in funzione delle dimensioni della carrozzina ed in base agli accessori aggiuntivi)	A partire da 8,5 (std. 10,5)	A partire da 7,9 (std. 9,6)	A partire da 7,3 (std. 8,5)	A partire da 6,6 (std. 7,3)
	PESO SENZA RUOTE POSTERIORI kg	A partire da 5,9 (std. 7,5)	A partire da 5,3 (std. 6,6)	A partire da 4,7 (std. 5,5)	A partire da 4,0 (std. 4,7)
	CARICO MASSIMO kg	125	125	140	125

TABELLA ACCESSORI

accessorio	descrizione	accessorio	descrizione
FRENI 	Leva curva a spinta Leva dritta a spinta o a tiro Sport Con leva prolungata a spinta o a tiro		Ruotine per passaggi stretti Estraibili e regolabili in altezza Ruotine antiribaltamento Destro, sinistro o entrambi i lati. Estraibili e girevoli con aggancio rapido, regolabili in altezza
			Maniglioni di spinta per accompagnatore Regolazione rapida in altezza ed estraibili
PEDANA 	Unica fissa in alluminio Posizioni: interna; 2/3 interna; 2/3 esterna; esterna JOKER nota: alzabile per Joker nella versione "zero" Unica fissa in carbonio Posizioni: interna; esterna JOKER nota: alzabile per Joker nella versione "zero" Unica fissa in carbonio* Posizioni: interna JOKER; JOKER EVOLUTION Unica fissa in alluminio Posizioni: interna; 2/3 interna; 2/3 esterna; esterna JOKER EVOLUTION; JOKER ENERGY; NOIR Sdoppiata in plastica Posizioni: 2/3 interna; 2/3 esterna JOKER versione ZERO, JOKER JUNIOR <i>Tutte le pedane sono regolabili in altezza, inclinazione e posizione.</i> <i>* non regolabile in inclinazione</i>		Maniglioni di spinta per accompagnatore Regolazione rapida in altezza ed estraibili
			Tubo aiuto ribaltamento Destro, sinistro o entrambi i lati. Regolabile in altezza ed estraibile
			Porta stampelle Prevede una fascetta (per legare le stampelle nella parte alta) fissata al tubo dello schienale. Destro, sinistro o entrambi i lati. Regolabile in altezza ed estraibile
			Cinghia pelvica Chinghia di bretellaggio Regolabili in lunghezza
			Maniglia di spinta pieghevole Per ridurre ingombro
			Spinta toracale Destra, sinistra o entrambi i lati. Regolabile in altezza e girevole.
	Braccioli tubolari Girevoli ed estraibili, regolabili in altezza		Tetraclip Perno ad estrazione rapida per semplificare la rimozione della ruota per i pazienti con limitata mobilità delle mani
	Corrimano Alluminio, titanio, acciaio, gomma dura, gomma morbida, a timone, ergo-para, anello in silicone, alluminio con profilo in gomma.		Copriraggi Impediscono alle dita di inserirsi tra i raggi delle ruote posteriori
			Tavolino Applicabile solo in presenza di braccioli